

Misinto (MB) ottobre 2017

Comunicazione aggiornamento Prodotti

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa dell'integrazione del Cacciavite Chirurgico nello strumentario a Sua disposizione per la chirurgia implantare; inoltre è nostra volontà porre evidenza sulla disponibilità delle componenti protesiche per la connessione \varnothing 3,25.

Strumentario

Il Cacciavite Chirurgico arricchisce la nostra già ampia gamma di strumenti. Questo dispositivo è utile alla movimentazione degli Avvitatori Finali, **IMA325** – **IMA3716** – **IMA3721** con attacco esagonale (chiave esagonale 3,7).

Con questo strumento il chirurgo ha la possibilità di inserire manualmente le fixture, soprattutto nei casi in cui la consistenza ossea è poco rappresentata ed è necessario mantenere un preciso asse implantare d'inserimento.



Cacciavite Chirurgico **PGI100**

Nel dettaglio qui evidenziato del Cacciavite Chirurgico **PGI100**, si può notare la porzione esagonale con chiave 3,7 che accoglie l'incastro degli strumenti Avvitatori Finali

1 di 2

Connessione Ø 3,25

In evidenza il Cilindro **CIT3200 (Ti5)** che assieme al Cilindro **CBR3200 (Pom)**, già a catalogo, rappresentano le componenti protesiche utili alla protesizzazione dei Pilastri E.M. BTA3210 e BTA3225:

- Cilindro cod. **CIT3200**
(connesso a BTA3210 e BTA3225 - Ti5)



- Cilindro cod. **CBR3200**
(connesso a BTA3210 e BTA3225 - Pom)
già a catalogo



Entrambe le componenti devono essere avvitate per mezzo della vite di fissaggio VBT3200 (max 20Ncm)

RingraziandoLa anticipatamente per l'attenzione, Le ricordiamo che siamo a disposizione per qualunque approfondimento tramite i nostri consueti referenti commerciali, o presso Dental Tech s.r.l. via G. di Vittorio, 10/12 – 20826 Misinto (MB) Tel. +39 02 967 20 218 – info@dental-tech.it.

Cordialmente.

Andrea Morandi